



BODE Desomat® P 800

Mikroprozessorgesteuertes Dosiergerät zur Herstellung und Entnahme von Gebrauchslösungen unter Druck.



Highlights

- Abgabe der Lösung erfolgt unter Druck aus dem Schwenkauslauf und einem zweiten Druckabgang mit entsprechend zu montierendem Absperrventil
- Exakte Einstellung der Dosierung des Konzentrates im Einstellbereich 0,25 % bis 3,0 % (optional 5,0 %)
- Einfache, freie Entnahme von Gebrauchslösungen
- Benutzerfreundliche Bedienung über eine Folientastatur mit Displayanzeige
- Praktische Wandinstallation löst Platzprobleme

Produkteigenschaften

- Kompaktes Edelstahlgehäuse entspricht optimal den Anforderungen aus der Praxis
- Anschluss- und montagefertige Auslieferung
- Die Menge des beizumischenden Produktes sowie des Wassers wird geräteseitig einer ständigen Kontrolle unterzogen
- Sicherheits- und EMV geprüft
- Die Gesamtkonstruktion der Geräte entspricht den VDE-Bestimmungen
- Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich

Technische Daten

Abmessungen Dosiergerät:	(H x B x T in mm) 350 x 300 x 140
Abmessungen Kanister-konsole 5 l:	(B x T in mm) 202 x 160
Gewicht:	10,7 kg
Dosiereinstellung:	0,25 % bis 3,0 % (optional 5,0 %)
Konzentratförderpumpe:	spezialbeschichtete SK-Pumpe(n)
Leistung / Fördermenge:	Entnahme an Gebrauchslösung maximal ca. 650 l / h bei 3 bar
Wasseranschluss:	Außengewinde ½ ", Wasserzuleitung CU-Rohr 12 x 1 mm
Wassertemperatur:	max. 40 °C
Wasserfließdruck:	mind. 1,6 bar; max. 6,0 bar (bei höherem Vordruck muss ein Druckminderer vorinstalliert werden)
Lösungsentnahme:	Schwenkauslauf mit Strahlregler und Festanschluss ½ " für externe Entnahmestellen
Steckernetzteil:	Eingang: 100-240 V ~ 50-60 Hz 1500 mA Ausgang: 24 VDC 2A
Schutzklasse:	III
Sicherheit:	optische Kontrollanzeige bei Störungen, Sperrung des Geräts bei Produkt- und Wassermangel, fehlendem Produktfluss sowie bei Stromausfall
Datenübertragung:	serielle Schnittstelle, optional: LAN, USB, Bluetooth

BODE Desomat® P 800



Anwendung

Der BODE Desomat® P 800 erstellt Gebrauchslösungen aus Konzentraten unter Druck. Damit können externe Entnahmestellen wie Sprühlanzen, Topfspülen oder entfernte Entnahmestellen angeschlossen werden.

Fachberatung

Tel: +49 (0)40 54006 – 666

E-Mail: servicetechnik@bode-chemie.de



**Wir forschen für
den Infektionsschutz**
hartmann-science-center.com

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
BODE Desomat® P 800	1 Stück	980 618	-	1



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Deutschland

Tel. +49 (0) 7321-36-0
Fax +49 (0) 7321-36-36
info@hartmann.info
www.hartmann.info

Hersteller: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg
Ein Unternehmen der HARTMANN GRUPPE