

HARTMANN



De duurzame toekomst van reiniging en oppervlakte-desinfectie



NIEUW

Bacillol® Zero Tissues

- +** Duurzaam op alle vlakken milieuvriendelijke formule, 100% plasticvrije doekjes, recycleerbare verpakking
- +** Uiterst effectief bactericide, gistdodend en virucide in 2 minuten



Bacillo[®] Zero Tissues: de toekomst van reiniging en desinfectie van oppervlakken

Duurzaamheid

Effectiviteit

Gebruiksvriendelijkheid

Mild voor oppervlakken

Onze benadering: effectiviteit en duurzaamheid

Ons doel met reiniging en desinfectie van oppervlakken was altijd al om mensen en hun gezondheid te beschermen. We trekken deze beschermingsvereiste door, door ons niet alleen op de reinigings- en desinfectietaak te richten, maar ook op het beschermen van de wereld om ons heen. Onze oplossing is een nieuw holistisch en duurzaam productconcept. Bacillo!® Zero is de belichaming van de nieuwe generatie reiniging en oppervlaktedesinfectie door van meet af aan ervoor te zorgen dat het toepassings-, effectiviteit- en verpakkingsconcept op maat zijn gemaakt voor zowel mens als milieu.

Verpakking

Doekje

Formule

Groen op elk niveau

NIEUW

organic acid complex

virucidal in 2 minutes

suitable for sensitive surfaces

plastic-free 100% tissues

100

Reinigings- en desinfectiedoekjes op basis van organische zuren

100%

FORMULE & EFFECT



Meer dan
98,5%
van de ingrediënten
hebben een
organische oorsprong

Innovatie:

Organic Acid Complex

Het gepatenteerde actieve ingrediëntcomplex van Bacillo[®] Zero tilt de reiniging en desinfectie van oppervlakken naar nieuwe hoogten. Dit complex is gemaakt op basis van fruitzuren en belooft een volledige reiniging en desinfectie en duurzaam gebruik tijdens uw dagelijkse werkzaamheden.

®



Hernieuwbare grondstoffen

Op basis van fruitzuren



Vrij van gangbare actieve ingrediënten

ZERO alcohol, QAC en oxidanten



Uitstekende materiaalcompatibiliteit

Kan ook zonder schroom worden gebruikt nabij patiëntoppervlakken en touchscreens



CTGB registratie en BPR goedgekeurd*

Bevestigd met de vereenvoudigde autorisatieprocedure van het ECHA

*Geregistreerd in de vereenvoudigde autorisatieprocedure BPR, waarmee het gebruik van biociden wordt gepromoot die minder schade toebrengen aan het milieu en de gezondheid van zowel mens als dier, maar nog steeds effectief zijn tegen bacteriën.



Bactericide, levurocide en virucide in 2 minuten.

Bewezen in de suspensietest en de praktische 4-veldtest.

DOEKJES & VERPAKKING



Tot wel **75% lagere CO₂-footprint** dan conventionele desinfectiedoekjes voor oppervlakken



Gebruik van een duurzame verpakkingsfolie die 100% recyclebaar is

Natuurvriendelijk

De formule, het materiaal van het doekje en het verpakkingsconcept zijn de graadmeter van een waar groen reinigings- en desinfectiedoekje. Bacillo!® Zero scoort hier met natuurvriendelijke grondstoffen, volledig recycleerbare folie en karton en hoge CO₂-besparingen. Al dit samen maakt van Bacillo!® Zero een ware GROENE HELD.



100% plasticvrije doekjes van hernieuwbare grondstoffen uit duurzame bosbouw



Bioafbreekbaar en composteerbaar niet-geweven stof



Vrij van zorgwekkende stoffen volgens de BPR
Veiligheid op alle gebieden



Bacillo[®] Zero - goedgekeurd volgens CTGB, MDR* - en BPR- normen



Al onze kwaliteits- en regelgevingssystemen zijn vandaag de dag al volledig omgezet naar de MDR-norm. We kunnen dus garanderen dat onze gebruikers continu en veilig producten kunnen gebruiken die door de MDR goedgekeurd zijn. Dit geldt ook voor Bacillo[®] Zero.

Bovendien is Bacillo[®] Zero goedgekeurd als biocide conform de Europese BPR én conform de landelijke CTGB norm. Bacillo[®] Zero kan dus voor twee doeleinden worden gebruikt, waardoor u optimaal en veilig wordt ondersteund in uw dagelijkse werkzaamheden.

Bewezen efficiëntie	Testmethode	Conditie	Blootstellingstijd
Bacteriën/schimmels			
Bactericide/gisticide	EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	Vuil	2 min.
Tuberculocide/myobactericide	EN 14348 / EN 16615	Vuil	60 min.
Virus			
Virucide	EN 14476 / EN 16615**	Vuil	2 min.



Productnaam	Inhoud	Artikelnr.
Bacillo [®] Zero tissues	Flowpack met 100 tissues Grootte 20 x 17 cm	981 935
Flowpack-wandhouder	1 wandhouder	981 205

*Verordening betreffende medische hulpmiddelen

**Gewijzigde 4-veldtest

Gebruik reinigings- en desinfectiemiddelen voor oppervlakken veilig. Raadpleeg vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Lees ook de gebruiksaanwijzing en de bijgevoegde instructies. Wijzig conform de lokale vereisten (bv. reclamewetgeving, productstatus, CLP-etikettering).



Helps. Cares. Protects.

PAUL HARTMANN B.V.
Postbus 26
6500 AA Nijmegen
nederland

algemeen@hartmann.info
www.hartmann.nl

Fabrikant: BODE Chemie GmbH, een bedrijf van de HARTMANN GROUP, Melanchthonstrasse 27, 22525 Hamburg, Duitsland