

# MoliCare® Premium lady pants

## Algemene productbeschrijving/beoogd gebruik:

MoliCare® Premium lady pants zijn optrekbare incontinentiebroekjes voor vrouwen.

De producten zijn geschikt voor gebruik in geval van ongewenst urineverlies in verschillende mate van ernst, voor urine-ontlastingsincontinentie in verschillende gradaties, en voor toilettraining.

De producten zijn bedoeld voor mobiele tot semi-mobiele patiënten, en onrustige of demente patiënten. De producten zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik en moeten regelmatig worden vervangen als dit nodig is.

De producten kunnen worden gebruikt in een thuiszorgomgeving en in professionele zorginstellingen. Het aanbrengen kan worden uitgevoerd door leken en/of door zorgprofessionals.

## Toepassing/indicatie

MoliCare® Premium lady pants zijn geschikt voor gebruik in geval van ongewenst urineverlies in verschillende mate van ernst, en voor urine- of ontlastingsincontinentie in verschillende gradaties, en voor toilettraining.



## Referentienummers\*

Verpakking		M	L
	Heup-/tailleomtrek (cm)	80–120	100–150
P8	5 drops / groen	915867	-
	7 drops / blauw	915877	-
P7	5 drops / groen	-	915868
	7 drops / blauw	-	915870
P1	5 drops / groen	915810	915811
	7 drops / blauw	915815	915816

\*Het volledige assortiment is mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar

## Hulpmiddel voor eenmalig gebruik

Het hergebruiken van een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik is gevaarlijk. Het recyclen van hulpmiddelen om ze opnieuw te kunnen gebruiken kan leiden tot ernstige beschadigingen en een sterk verminderde werking. Informatie beschikbaar op verzoek. Hergebruik van het product kan leiden tot microbiologische verontreiniging en/of milde huidinfecties.

# MoliCare® Premium lady pants

## Verwijdering van het product

Om het risico op infecties of milieuverontreiniging te beperken, moeten bij het weggooien van de wegwerpbare delen van MoliCare® Premium lady pants de verwijderingsprocedures worden gevolgd in overeenstemming met de van toepassing zijnde lokale wet- en regelgeving, voorschriften en infectiepreventiestandaarden.

## Melding van incidenten

Voor een patiënt/gebruiker/derde in de Europese Unie en in landen met een vergelijkbaar wetstelsel (Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen); als tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is voorgevallen, meld dit dan bij de fabrikant en/of zijn gemachtigde en bij de betreffende landelijke instantie.

## Prestatiekenmerken per product

MoliCare® Premium lady pants 5 drops / groen:

Kenmerken	maateenheid	M	L
totaal gewicht:*	[g]	44	51

\* $\leq \pm 10\%$  toegestane afwijking

MoliCare® Premium lady pants 7 drops / blauw:

Kenmerken	maateenheid	M	L
totaal gewicht:*	[g]	67	71

\* $\leq \pm 10\%$  toegestane afwijking

## Materiaaleigenschappen

Onderdeel	Materiaal
basisdeel	polypropyleen non-woven, hydrofoob, ademend, wit, met opdruk
achterlaag	polyethyleen-folie met polypropyleen non-woven laag, wit, ademend
absorberende kern (3-laags)	1. laag: kraftpulp* 2. laag: kraftpulp*- met superabsorberend polymeer 3. laag: kraftpulp*, 'curled fiber' *elementair chloorvrij gebleekt
kleeflaag	smeltlijm
toplaag	polypropyleen - non-woven, hydrofiel, wit, behandeld met aloë vera
manchet:	polypropyleen - non-woven, hydrofoob, wit
elastieken	elastieken van polyurethaan voor beenplooiën, heupband en (alleen voor 7 drops) rechtopstaande randen
Productinformatie:	vermeld aan de binnenkant van de heupband (achterzijde)

## Productkenmerken


Afmetingen	5 drops		7 drops	
	M	L	M	L
totale lengte:	740	780	730	830
totale breedte:	660	810	660	810
totale breedte kruisstreek:	165	165	210	215
lengte absorberende kern:	340	370	490	580
breedte absorberende kern:	120	120	180	180
breedte absorberende kern in kruisstreek:	90	90	140	140

\* $\leq \pm 10\%$  toegestane afwijking

# MoliCare® Premium lady pants

## Etikettering

Partijnr. met 9-cijferige code

bijv.:  9 001 02 82 2  
Jaar 201X Interne code Interne code Interne code gecumuleerd  
controlegetal

Productiedatum

bijv.:  2019 08 07  
jaar maand dag

Uiterste gebruiksdatum

bijv.:  2024 08 01  
jaar maand dag

Houdbaarheid: 5 jaar

Medisch hulpmiddel



Droog bewaren



Niet opnieuw gebruiken



CE-markering



**Laatste herzieningsdatum: 4-10-2019**