

# MoliCare® Premium MEN PANTS

## Algemene productbeschrijving/beoogd gebruik:

MoliCare® Premium MEN PANTS zijn optrekbare incontinentiebroekjes voor mannen.

De producten zijn geschikt voor gebruik in geval van ongewenst urineverlies in verschillende mate van ernst, voor urine- en ontlastingsincontinentie in verschillende gradaties, en voor toilettraining.

De producten zijn bedoeld voor mobiele tot semi-mobiele patiënten, en onrustige of demente patiënten. De producten zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik en moeten regelmatig worden vervangen als dit nodig is.

De producten kunnen worden gebruikt in een thuiszorgomgeving en in professionele zorginstellingen. Het aanbrengen kan worden uitgevoerd door leken en/of door zorgprofessionals.

## Toepassing/indicatie

MoliCare® Premium MEN PANTS zijn geschikt voor gebruik in geval van ongewenst urineverlies in verschillende mate van ernst, van urine- en ontlastingsincontinentie in verschillende gradaties, en voor toilettraining.



## Referentienummers\*

Verpakking		M	L
	Heup-/tailleomtrek (cm)	80-120	100-150
P8	5 druppels / groen	915817	-
	7 druppels / blauw	915827	-
P7	5 druppels / groen	-	915818
	7 druppels / blauw	-	915828
P1	5 druppels / groen	915802	915803
	7 druppels / blauw	915807	915808

\*Het volledige assortiment is mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar

# MoliCare® Premium MEN PANTS

## Hulpmiddel voor eenmalig gebruik

Het hergebruiken van een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik is gevaarlijk. Het recyclen van hulpmiddelen om ze opnieuw te kunnen gebruiken kan leiden tot ernstige beschadigingen en een sterk verminderde werking. Informatie beschikbaar op verzoek. Hergebruik van het product kan leiden tot microbiologische verontreiniging en/of milde huidinfecties.

## Verwijdering van het product

Om het risico op infecties of milieuverontreiniging te beperken, moeten bij het weggooien van de wegwerpbare delen van MoliCare® Premium MEN PANTS de verwijderingsprocedures worden gevolgd in overeenstemming met de van toepassing zijnde lokale wet- en regelgeving, voorschriften en infectiepreventiestandaarden.

## Melding van incidenten

Voor een patiënt/gebruiker/derde in de Europese Unie en in landen met een vergelijkbaar wetstelsel (Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen); als tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is voorgevallen, meld dit dan bij de fabrikant en/of zijn gemachtigde en bij de betreffende landelijke instantie.

## Prestatiekenmerken per product

MoliCare® Premium MEN PANTS 5 druppels / groen:

Kenmerken	maateenheid	M	L
totaal gewicht:*	[g]	55	62

\* $\pm$  10% toegestane afwijking

MoliCare® Premium MEN PANTS 7 druppels / blauw:

Kenmerken	maateenheid	M	L
totaal gewicht:*	[g]	65	71

\* $\pm$  10% toegestane afwijking

## Materiaaleigenschappen

Onderdeel	Materiaal
Basisdeel:	polypropyleen non-woven, hydrofoob, ademend, grijs
Achterlaag:	polyethyleen-folie met polypropyleen non-woven laag, ademend, grijs
Absorberende kern (3-laags)	1. laag: kraftpulp* 2. laag: kraftpulp* - met superabsorberend polymeer 3. laag: kraftpulp*, 'curled fiber' *elementair chloorvrij gebleekt
Kleeflaag:	smeltlijm
Toplaag:	polypropyleen - non-woven, hydrofiel, wit
Manchet:	polypropyleen - non-woven, hydrofoob, wit
Elastieken:	elastieken van polyurethaan voor beenplooien, heupgebied, heupband en rechtopstaande randen
Productinformatie:	vermeld aan de binnenkant van de heupband (achterzijde)

# MoliCare® Premium MEN PANTS

## Productkenmerken

Afmetingen	M	L
totale lengte*:	750	850
totale breedte*:	660	810
totale breedte kruisstreek*:	245	245
lengte absorberende kern*:	470	520
breedte absorberende kern*:	180	180
breedte absorberende kern in kruisstreek*:	110	110

\* ≤ ± 10% toegestane afwijking

## Etikettering

### Partijnr. met 9-cijferige code


bijv.: 

9	001	02	82	2
Jaar 201X	Interne code	Interne code	Interne code	gecumuleerd controlegetal

### Productiedatum

bijv.:  2019 jaar 08 maand 07 dag

### Uiterste gebruiksdatum

bijv.:  2024 jaar 08 maand 01 dag

### Houdbaarheid 5 jaar

### Medisch hulpmiddel



### Droog bewaren



### Niet opnieuw gebruiken



### CE-markering



Laatste herzieningsdatum: 4-10-2019