

MoliCare® Rectangular

Algemene productbeschrijving/beoogd gebruik


Beoogd gebruik

MoliCare® Rectangular zijn niet-steriele uniseks hulpmiddelen met een zachte papieren tussenlaag voor langdurige controle van lichte urine- en fecesincontinentie bij volwassenen voor eenmalig gebruik. De hulpmiddelen kunnen worden aangebracht in de genitale zone door leken en zorgprofessionals in een klinische en/of thuisomgeving gedurende een periode van meer dan 30 dagen.

Toepassing/indicatie

MoliCare® Rectangular is bedoeld voor het absorberen van urine en feces als gevolg van incontinentie.

Aanbrengtechniek voor 3, 4 en 5 druppels:

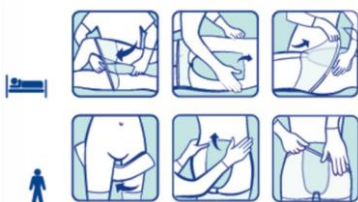

Aanbrengtechniek voor 3,5 druppels



Referentienummers*

Producten	Versie	Referentienummer	Verpakking
MoliCare® Rectangular	MoliCare® Rectangular 3 druppels	160890	50
	MoliCare® Rectangular 3,5 druppels	148530	56
	MoliCare® Rectangular 4 druppels	160892	50
	MoliCare® Rectangular 5 druppels	160860	28

*mogelijk niet verkrijgbaar in alle landen

Hulpmiddel voor eenmalig gebruik

Het hergebruiken van een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik is gevaarlijk. Het recycleren van hulpmiddelen om ze opnieuw te kunnen gebruiken kan leiden tot ernstige beschadigingen en een sterk verminderde werking. Informatie beschikbaar op verzoek. Hergebruik van het product kan leiden tot microbiologische verontreiniging en/of milde huidinfecties.

Verwijdering van het product

Om het risico op infecties of milieuvervuiling tot een minimum te beperken, moeten bij het weggooien van de wegwerpbare delen van MoliCare® Rectangular de verwijderingsprocedures worden gevolgd in overeenstemming met de van toepassing zijnde, lokale wet- en regelgeving, voorschriften en infectiepreventiestandaarden.

Melding van incidenten

Voor een patiënt/gebruiker/derde partij in de Europese Unie en in landen met identieke regelgeving (Verordening 2017/745/EU betreffende medische hulpmiddelen): als zich tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident heeft voorgedaan, meld dit incident dan aan de fabrikant en/of zijn gemachtigde en aan uw nationale bevoegde autoriteit.

MoliCare® Rectangular

Prestatiekenmerken per product

MoliCare® Rectangular

Kenmerken	3 druppels	3,5 druppels	4 druppels	5 druppels
Totaal gewicht* [g]	23,7	27,7	37,7	52,9
Gewicht absorptiekern* [g]	19,8	24,7	31,8	49,1

* ≤ ± 10% toegestane afwijking

Materiaaleigenschappen

Onderdeel	Materiaal
Zachte tussenlaag	Kraftcelstof en water
Bovenlaag	Polypropyleen – non-woven, hydrofiel, wit
Absorptiekern	Superabsorberend polymeer
Buitenzijde	Polyethyleen, non-woven folielaag, diverse kleuren
Kleefmiddelen	Smeltlijm

Productkenmerken


MoliCare® Rectangular

Afmetingen	3 druppels	3,5 druppels	4 druppels	5 druppels
Totale lengte* [mm]	400	350	600	600
Totale breedte* [mm]	200	108	200	150
Lengte absorberende kern* [mm]	320	320	540	540
Breedte absorberende kern* [mm]	190	105	190	140

* ≤ ± 10% toegestane afwijking

Etikettering

Partijnr. met 9-cijferige code

bijv.: 900102822	9	001	02	82	2
	jaar 201X	interne code	interne code	interne code	gecumuleerd controlegetal

Productiedatum

bijv.: 	2019	10	10
	jaar	maand	dag

Uiterste gebruiksdatum

bijv.: 	2024	10	10
	jaar	maand	dag

MoliCare[®] Rectangular

Houdbaarheid 5 jaar

Medisch hulpmiddel



Unieke hulpmiddelenidentificatie (UDI)



Droog bewaren



Niet opnieuw gebruiken



CE-markering



Laatste herzieningsdatum: 6-11-2019