

MoliCare® Premium Form

Algemene productbeschrijving/beoogd gebruik

MoliCare® Premium Form producten zijn absorberende inleggers voor incontinentiezorg. In combinatie met fixatiesystemen zijn de producten geschikt voor gebruik bij ongewenst urineverlies in verschillende maten van ernst, en voor urine- ontlastingsincontinentie in verschillende gradaties.

MoliCare® Premium Form zijn bedoeld voor mobiele tot immobiele patiënten (vrouwen en mannen).


MoliCare® Premium Form MEN is bedoeld voor mobiele tot immobiele patiënten (mannen).

De producten zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik en moeten regelmatig worden vervangen als dit nodig is.

MoliCare® Premium Form kan worden gebruikt in een thuisomgeving en in professionele zorginstellingen. Het aanbrengen kan worden uitgevoerd door leken en/of door zorgprofessionals.

Toepassing/indicatie

Verschillende gradaties van urine- en ontlastingsincontinentie

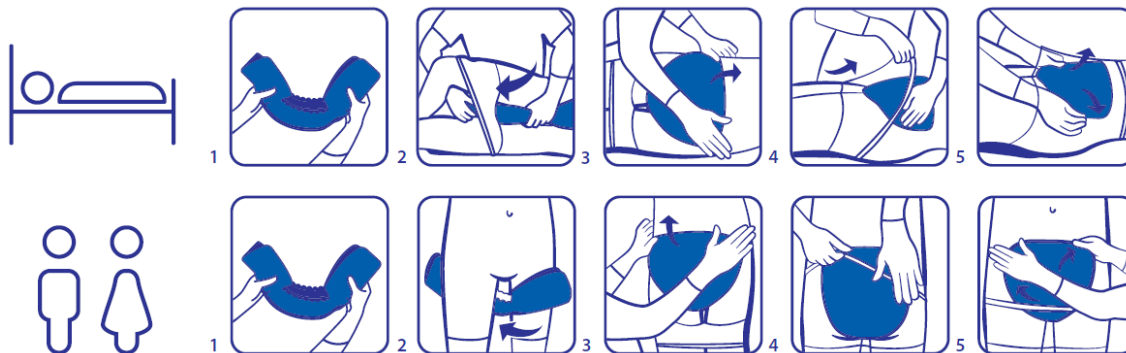

Referentienummers*

Verpakking	P32	P16	Display (P32)	P2
3 druppels	168 403	-	-	168 203
4 druppels	168 404	-	168 804 / 168 904	168 204
5 druppels	168 405	-	168 805 / 168 905	168 205
6 druppels	168 406	-	168 806 / 168 906	168 206
7 druppels	168 407	-	168 907	168 207
8 druppels	168 408	-	168 808 / 168 908	168 208
9 druppels	-	168 409	-	168 209
6 druppels MEN	168 401	-	-	168 201

*Het volledige assortiment is mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar

MoliCare® Premium Form

Hulpmiddel voor eenmalig gebruik

Het hergebruiken van een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik is gevaarlijk. Het herverwerken van hulpmiddelen om ze opnieuw te kunnen gebruiken kan leiden tot ernstige beschadigingen en een sterk verminderde werking. Informatie beschikbaar op verzoek. Hergebruik van het product kan leiden tot microbiologische verontreiniging en/of milde huidinfecties.

Verwijdering van het product

Om het risico op infecties of milieuvervuiling tot een minimum te beperken, moeten bij het weggooien van de wegwerpbare delen van MoliCare® Premium Form de verwijderingsprocedures worden gevolgd in overeenstemming met de van toepassing zijnde lokale wet- en regelgeving, voorschriften en infectiepreventiestandaarden.

Melding van incidenten

Voor een patiënt/gebruiker/derde in de Europese Unie en in landen met een vergelijkbaar wetstelsel (Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen); als tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is voorgevallen, meld dit dan bij de fabrikant en/of zijn gemachtigde en bij de betreffende nationale instantie.

Prestatiekenmerken van het product

Kenmerken	maateenheid	3 druppels	4 druppels	5 druppels	6 druppels	7 druppels	8 druppels	9 druppels	6 druppels MAN
totaal gewicht:*	[g]	50	57	62	93	97	105	131	93

* ± 10 % toegestane afwijking

Materiaaleigenschappen

Onderdeel	Materiaal
achterlaag:	polyethyleen, non-woven folielaag, wit
Absorberende kern:	kraftpulp* superabsorberend polymeer pH-buffermiddel non-woven, hydrofiel, wit
hechtmiddel:	smeltlijm
toplaag:	polypropyleen - non-woven, hydrofiel, wit
manchet:	polypropyleen - non-woven, hydrofoob, wit
elastieken:	elastieken voor beenplooien en rechtopstaande randen
vochtindicator:	wateroplosbare inkt

* elementair chloorvrij gebleekt

MoliCare® Premium Form

Productkenmerken

Afmetingen	3 druppels	4 druppels	5 druppels	6 druppels	7 druppels	8 druppels	9 druppels	6 druppels MAN
totale lengte:*	525	620	620	690	690	690	690	690
totale breedte buikzijde:*	260	280	280	300	300	300	300	310
totale breedte rugzijde*	280	295	295	310	310	310	310	310
totale breedte kruisstreek:*	210	235	235	245	245	245	245	245
lengte absorberende kern:*	474	560	560	630	630	630	630	630
breedte absorberende kern aan buikzijde:*	215	240	240	250	250	250	250	270
breedte absorberende kern aan rugzijde:*	242	240	240	260	260	260	260	260
breedte absorberende kern in kruisstreek:*	134	160	160	170	170	170	170	160

* ± 10 % toegestane afwijking

Etikettering

Partijnr. met 9-cijferige code

bijv.: 100102822



1

001

02

82

2

jaar 202X

interne code

interne code

interne code

gecumuleerd
controlegetal

Productiedatum

bijv.



2021
jaar

08
maand

07
dag

Uiterste gebruiksdatum

bijv.



2026
jaar

08
maand

01
dag

Houdbaarheid: 5 jaar

Medisch hulpmiddel



Technische specificaties

MoliCare® Premium Form

Distributeur



Droog bewaren



Niet opnieuw gebruiken



CE-markering



Laatste herzieningsdatum: 11-1-2022