

MoliCare® Pads

Algemene productbeschrijving/beoogd gebruik

MoliCare® Pads zijn niet-steriele, anatomisch gevormde kompressen voor zeer licht tot matig urineverlies evenals ontlastingsincontinentie. De producten kunnen worden gebruikt in de thuiszorgomgeving en professionele zorginstellingen en het aanbrengen kan worden uitgevoerd door leken en/of zorgverleners. De inleggers zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik en moeten regelmatig worden vervangen als dit nodig is. MoliCare® Pads behoren tot klasse I medische hulpmiddelen.

Toepassing/indicatie

MoliCare® Pad-inleggers zijn bedoeld voor het absorberen van urine en feces* bij incontinentie.

*alleen MoliCare® Pad 4 druppels.



Afbeelding 1 Aanbrengtechniek

Catalogusnummers

Artikel	Referentienummer*	Verpakkingsinhoud
MoliCare® Pad 2 druppels	168 075	30 stuks
MoliCare® Pad 3 druppels	168 076	30 stuks
MoliCare® Pad 4 druppels	168 077	30 stuks
MoliCare® Pad 2 druppels	168 079	1 stuk
MoliCare® Pad 3 druppels	168 080	1 stuk
MoliCare® Pad 4 druppels	168 081	1 stuk

*mogelijk niet verkrijgbaar in alle landen

Hulpmiddel voor eenmalig gebruik

Het hergebruiken van een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik is gevaarlijk. Het recyclen van hulpmiddelen om ze opnieuw te kunnen gebruiken kan leiden tot ernstige beschadigingen en een sterk verminderde werking. Informatie beschikbaar op verzoek. Hergebruik van het product kan leiden tot microbiologische verontreiniging en/of milde huidinfecties.

Verwijdering van het product

Om het risico van mogelijke infectiegevaaren of milieuvervuiling te minimaliseren, moeten wegwerpc componenten van MoliCare® Pads worden afgevoerd volgens de geldende en plaatselijke wetten, regels, voorschriften en infectiepreventienormen.

MoliCare® Pads

Melding van incidenten

Voor een patiënt/gebruiker/derde in de Europese Unie en in landen met een vergelijkbaar wetstelsel (Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen); als tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is voorgevallen, meld dit dan bij de fabrikant en/of zijn gemachtigde en bij de betreffende nationale instantie.

Prestatiekenmerken van het product

Kenmerken	2 druppels	3 druppels	4 druppels
Totaal gewicht [g]	13,3	19,2	31,8
Gewicht absorptiekern* [g]	11,2	16,3	27,3

≤ ± 10% toegestane afwijking

Materiaaleigenschappen

Onderdeel	Materiaal
Bovenlaag	Polypropyleen – non-woven, hydrofiel, wit
Absorberende kern:	Kraftpulp* Superabsorberend polymeer pH-buffermiddel Non-woven, hydrofiel, wit
Buitenzijde	Polyethyleen, non-woven folielaag, wit
Elastieken	Elastische film voor beenrand
Kleefmiddelen	Smeltlijm
Achterzijde	Gesiliconiseerd papier

*elementair chloorvrij gebleekt

Productkenmerken

Afmetingen in mm	2 druppels	3 druppels	4 druppels
Totale lengte	265	335	400
Totale breedte	112	132	162
Lengte absorberende kern	233	305	365
Breedte absorberende kern	90	112	138

≤ ± 10% toegestane afwijking

Technische

MoliCare® Pads

Etikettering

Partijnr. met 9-cijferige code

bijv.: 300102822



3
jaar 202X

001
interne code

02
interne code

82
interne code

2
gecumuleerd
controlegetal

Productiedatum

bijv.:



2023
jaar

06
maand

02
dag

Vervaldatum

bijv.:



2028
jaar

06
maand

02
dag

Houdbaarheid: 5 jaar

Medisch hulpmiddel



Unieke hulpmiddelidentificatie (UDI)



Droog bewaren



Niet opnieuw gebruiken



CE-markering



Revisiedatum van de tekst: 14-12-2023