

# MoliCare® Premium MEN Pads

## Algemene productbeschrijving/beoogd gebruik

MoliCare® Premium MEN Pads zijn niet-steriele, anatomisch gevormde pads voor zeer licht tot matig urineverlies. De producten kunnen worden gebruikt in de thuiszorgomgeving en professionele zorginstellingen en het aanbrengen kan worden uitgevoerd door leken en/of zorgverleners. De inleggers zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik en moeten regelmatig worden vervangen als dit nodig is. De MoliCare® Premium MEN Pad-inleggers behoren tot klasse I medische hulpmiddelen.

## Toepassing/indicatie

MoliCare® Premium MEN PAD zijn bedoeld voor het absorberen van urine bij incontinentie.



Toepasbaar voor MoliCare® MEN PAD 2 druppels



Toepasbaar voor MoliCare® MEN PAD 3 – 5 druppels

## Catalogusnummers

Artikel	Referentienummer*	Verpakkingsinhoud
MoliCare® Premium MEN Pad 2 druppels	168 067	14 stuks
MoliCare® Premium MEN Pad 3 druppels	168 066	14 stuks
MoliCare® Premium MEN Pad 4 druppels	168 068	14 stuks
MoliCare® Premium MEN Pad 5 druppels	168 069	14 stuks
MoliCare® Premium MEN Pad 2 druppels	168 071	1 stuk
MoliCare® Premium MEN Pad 3 druppels	168 176	1 stuk
MoliCare® Premium MEN Pad 4 druppels	168 072	1 stuk
MoliCare® Premium MEN Pad 5 druppels	168 073	1 stuk

\*mogelijk niet verkrijgbaar in alle landen

## Hulpmiddel voor eenmalig gebruik

Het hergebruiken van een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik is gevaarlijk. Het recyclen van hulpmiddelen om ze opnieuw te kunnen gebruiken kan leiden tot ernstige beschadigingen en een sterk verminderde werking. Informatie beschikbaar op verzoek. Hergebruik van het product kan leiden tot microbiologische verontreiniging en/of milde huidinfecties.

## Verwijdering van het product

Om het risico van mogelijke infectiegevaaren of milieuvervuiling te minimaliseren, moeten wegwerpc componenten van MoliCare® Premium MEN Pads worden afgevoerd volgens de geldende en plaatselijke wetten, regels, voorschriften en infectiepreventienormen.

# MoliCare® Premium MEN Pads

## Melding van incidenten

Voor een patiënt/gebruiker/derde in de Europese Unie en in landen met een vergelijkbaar wetstelsel (Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen); als tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is voorgevallen, meld dit dan bij de fabrikant en/of zijn gemachtigde en bij de betreffende nationale instantie.

## Prestatiekenmerken van het product

Kenmerken	2 druppels	3 druppels	4 druppels	5 druppels
Totaal gewicht [g]	12,9	16,8	18,8	32,3
Gewicht absorptiekern* [g]	10,4	13,9	15,9	28,4

≤ ± 10% toegestane afwijking

## Materiaaleigenschappen

Onderdeel	Materiaal
Bovenlaag	Polypropyleen – non-woven, hydrofiel, wit
Absorberende kern:	Kraftpulp* Superabsorberend polymeer pH-buffermiddel Non-woven, hydrofiel, wit
Buitenzijde	Ademende buitenzijde uit textiel, wit
Elastieken	Elastische draden, wit (Lycra HyFit)
Randen	Polypropyleen – non-woven, hydrofoob, wit (uitgezonderd 2 druppels)
Kleefmiddelen	Smeltlijm
Achterzijde	Gesiliconiseerd papier

\*elementair chloorvrij gebleekt

## Productkenmerken

Afmetingen in mm	2 druppels	3 druppels	4 druppels	5 druppels
Totale lengte	148**	270	270	345
Totale breedte	115**	180	180	180
Lengte absorberende kern	240	230	230	307
Breedte absorberende kern	110	152	152	152

≤ ± 10% toegestane afwijking

\*\* gevouwen product

Technische

# MoliCare® Premium MEN Pads

## Etikettering

Partijnr. met 9-cijferige code

bijv.: 300102822



3  
jaar 202X

001  
interne code

02  
interne code

82  
interne code

2  
gecumuleerd  
controlegetal

## Productiedatum

bijv.:



2023  
jaar

06  
maand

02  
dag

## Vervaldatum

bijv.:



2028  
jaar

06  
maand

02  
dag

Houdbaarheid: 5 jaar

## Medisch hulpmiddel



## Unieke hulpmiddelidentificatie (UDI)



## Droog bewaren



## Niet opnieuw gebruiken



## CE-markering



**Revisiedatum van de tekst:** 15-9-2023