

MoliCare® Premium Form STOOL

Algemene productbeschrijving/beoogd gebruik

Beoogd gebruik:

MoliCare® Premium Form STOOL zijn absorberende inleggers voor incontinentiezorg. In combinatie met fixatiesystemen zijn MoliCare® Premium Form STOOL geschikt voor gebruik bij ongewenst urineverlies in verschillende maten van ernst, en voor urine- en ontlastingsincontinentie in verschillende gradaties (vloeibaar en vast).

MoliCare® Premium Form STOOL zijn bedoeld voor mobiele tot immobiele patiënten (vrouwen en mannen).

MoliCare® Premium Form STOOL zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik en moeten regelmatig worden vervangen als dit nodig is.

MoliCare® Premium Form STOOL kunnen worden gebruikt in een thuisomgeving en in professionele zorginstellingen. Het aanbrengen kan worden uitgevoerd door leken en/of door zorgprofessionals.

Toepassing/indicatie

MoliCare Premium Form STOOL zijn absorberende incontinentieproducten speciaal voor ontlastingsincontinentie van verschillende ernst (vloeibaar en vast)



Referentienummer

Verpakking	P32	P2
MoliCare Premium Form STOOL	168 197	168 874

Hulpmiddel voor eenmalig gebruik

Het hergebruiken van een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik is gevaarlijk. Het herverwerken van hulpmiddelen om ze opnieuw te kunnen gebruiken kan leiden tot ernstige beschadigingen en een sterk verminderde werking. Informatie beschikbaar op verzoek. Hergebruik van het product kan leiden tot microbiologische verontreiniging en/of milde huidinfecties.

Verwijdering van het product

Om het risico op infecties of milieuvervuiling tot een minimum te beperken, moeten bij het weggooien van de wegwerpbare delen van MoliCare® Premium Form STOOL de verwijderingsprocedures worden gevolgd in overeenstemming met de van toepassing zijnde lokale wet- en regelgeving, voorschriften en infectiepreventiestandaarden.

MoliCare® Premium Form STOOL

Melding van incidenten

Voor een patiënt/gebruiker/derde in de Europese Unie en in landen met een vergelijkbaar wetstelsel (Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen); als tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is voorgevallen, meld dit dan bij de fabrikant en/of zijn gemachtigde en bij de betreffende nationale instantie.

Prestatiekenmerken per product

Kenmerken	maateenheid	
totaal gewicht:*	[g]	48,6

* ≤ 10 % toegestane afwijking

Materiaaleigenschappen

Onderdeel	Materiaal
achterlaag:	polyethyleen, niet-geweven folielaag, wit
absorptiekern	kraftpulp* kraftpulp*, 'curled fiber' superabsorberend polymeer
hechtmiddel:	smeltlijm
toplaag:	polypropyleen - niet-geweven, hydrofiel, wit
manchet:	polypropyleen - niet-geweven, hydrofoob, wit
elastieken:	elastieken voor beenplooiën en rechtopstaande randen

* elementair chloorvrij gebleekt

Productkenmerken

Afmetingen in mm	
totale lengte:*	690
totale breedte buikzijde:*	300
totale breedte rugzijde*	310
totale breedte kruisstreek:*	245
lengte absorberende kern:*	630
breedte absorberende kern aan buikzijde:*	250
breedte absorberende kern aan rugzijde:*	260
breedte absorberende kern in kruisstreek:*	170

* ≤ 10 % toegestane afwijking

MoliCare® Premium Form STOOL

Etikettering

Partijnr. met 9-cijferige code

bijv.: 100102822



1
jaar 2021


001
interne code

02
interne code

82
interne code

2
gecumuleerd
controlegetal

Productiedatum


bijv.: 

2021
jaar

08
maand

07
dag

Uiterste gebruiksdatum

bijv.: 

2026
jaar

08
maand

01
dag

Houdbaarheid: 5 jaar

Medisch hulpmiddel



Distributeur:



Droog bewaren



Niet opnieuw gebruiken



CE-markering



Laatste herzieningsdatum: 20-08-2021