

# MoliCare® premium Mobile

## DISPOSITIF MÉDICAL

### Description générale du produit/destination

Les produits MoliCare® premium Mobile sont des pull-up pour l'incontinence.

Les produits sont adaptés pour une utilisation en cas de fuites urinaires de sévérités diverses, d'incontinence urinaire et fécale de sévérités diverses et pour l'apprentissage de l'utilisation des toilettes.

Les produits sont destinés aux patients mobiles à semi-mobiles et aux patients agités ou déments. Les produits sont à usage unique et doivent être changés régulièrement en fonction des besoins.

Les produits peuvent être utilisés dans le milieu des soins à domicile et les établissements de soins professionnels. L'application peut être effectuée par un profane et/ou un professionnel de la santé. Les produits sont catégorisés comme dispositifs médicaux de classe I.

### Application/indication

Les produits MoliCare® premium Mobile sont adaptés pour une utilisation en cas de fuites urinaires de sévérités diverses, d'incontinence urinaire et fécale de sévérités diverses et pour l'apprentissage de l'utilisation des toilettes.



### Numéros de référence\*

Emballage		XS	S	M	L	XL
	Tour de hanche/taille (cm)	45-70	60-90	80-120	100-150	130-170
P14/ DPL	5 gouttes/ vert	-	166123	166000/ 166011	166001/ 166012	166002
	6 gouttes/ bleu	166225	166013	166014/ 166027	166015/ 166028	166016
	8 gouttes/ mauve	-	166029	166030	166031	166032
	10 gouttes/ gris	-	-	166041	166042	166043
P1	5 gouttes/ vert	-	166007	166008	166009	166010
	6 gouttes/ bleu	166022	166023	166024	166025	166026
	8 gouttes/ mauve	-	166037	166038	166039	166040
	10 gouttes/ gris	-	-	166047	166048	166049

# MoliCare® premium Mobile

\* Il est possible que la gamme de produits ne soit pas disponible dans son intégralité dans tous les pays

## Dispositif à usage unique

La réutilisation d'un dispositif médical à usage unique est dangereuse et peut gravement nuire à son intégrité et à ses performances. Informations plus détaillées disponibles sur demande. La réutilisation du produit pourrait entraîner une contamination microbiologique et/ou de légères infections cutanées.

## Élimination du produit

Afin de minimiser le risque d'infections potentielles ou de pollution environnementale, les composants jetables de MoliCare® premium Mobile doivent être mis au rebut conformément aux procédures d'élimination stipulées dans les lois, règlements, réglementations et normes de préventions des infections locales et en vigueur.

## Déclaration d'incident

Pour un patient/utilisateur/tiers situé dans l'Union européenne ou dans des pays disposant de réglementations identiques (Règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux) ; si, au cours de l'utilisation de ce dispositif ou en conséquence de son utilisation, un incident grave est survenu, veuillez déclarer celui-ci au fabricant et/ou son représentant autorisé, ainsi qu'à l'autorité de votre pays.

## Caractéristiques de performance du produit

### MoliCare® Premium Mobile 5 gouttes / vert :

Propriété	Unité	XS	S	M	L	XL
poids total : **	[g]	-	53	55,5	66,9	70,9

\*\* ≤ ± 10 % de tolérance

### MoliCare® Premium Mobile 6 gouttes/bleu :

Propriété	Unité	XS	S	M	L	XL
poids total : **	[g]	65,5	67,3	74,7	89,5	102,1

\*\* ≤ ± 10 % de tolérance

### MoliCare® Premium Mobile 8 gouttes/mauve :

Propriété	Unité	XS	S	M	L	XL
poids total : **	[g]	-	77,8	85,4	102	106,2

\*\* ≤ ± 10 % de tolérance

### MoliCare® Premium Mobile 10 gouttes / gris :

Propriété	Unité	XS	S	M	L	XL
poids total : *	[g]	-	-	102,9	108,4	112,5

\*\* ≤ ± 10 % de tolérance

## Fiche technique

# MoliCare<sup>®</sup> premium Mobile

### Caractéristiques physiques

Élément	Matériau
châssis	polypropylène non tissé, hydrophobe, respirant, blanc
couche arrière :	film en polyéthylène avec couche de polypropylène non tissé, blanc, respirant
coussin absorbant (3 couches) :	1ere couche : pâte kraft*** 2eme couche : pâte kraft*** - avec polymère superabsorbant 3eme couche : tampon traité non tissé, hydrophile, blanc *** blanchie sans chlore élémentaire
adhésif :	adhésif thermofusible
couche supérieure :	polypropylène - non tissé, hydrophile, blanc
barrières :	polypropylène - non tissé, hydrophobe, blanc
élastiques :	élastiques à base de polyuréthane pour les fronces de tour de jambes, les barrières antifuite, la taille et la région des hanches
indicateur d'humidité :	encre soluble dans l'eau

### Caractéristiques du produit

Dimensions [mm]	XS	S	M	L	XL
longueur totale** :	690	690	740	840	915
largeur totale** :	550	550	660	810	900
largeur totale, entrejambe** :	250	250	250	250	250
longueur du coussin absorbant** :	460	460	460	560	560
largeur du coussin absorbant** :	180	180	180	180	180
largeur du coussin absorbant à l'entrejambe** :	120	120	120	120	120

\*\* ≤ ± 10 % de tolérance

### Étiquetage

#### N° de lot avec code à 9 caractères

p. ex. :



2

001

02

82

5

année

clé interne

clé interne

clé interne

cumulé  
total de contrôle

#### Date de fabrication

p. ex. :



2024

08

02

année

mois

jour

#### Date de péremption

p. ex. :



2029

08

01

année

mois

jour

Fiche technique

# MoliCare<sup>®</sup> premium Mobile

Durée de conservation : 5 ans

Dispositif médical



Identificateur d'appareil unique



Distributeur



**Date de révision du texte** : 05-09-2024