

HARTMANN



Bacillol® 30 Sensitive Foam

Geringalkoholisches Schnell-Desinfektionsmittel für empfindliche Oberflächen



CE 0482

Produkteigenschaften

- Schnell wirksamer Sprühschaum
- Sehr guter Reinigungseffekt
- Sehr gute Hautverträglichkeit (dermatologisch getestet)
- Einfach und schnell in der Anwendung – auch ohne Handschuhe*
- Besonders materialschonend – auch geeignet für empfindliche Materialien wie: Polycarbonat (PC), Acrylglas (PMMA) und Polysulfon



Anwendungsgebiete

Bacillol® 30 Sensitive Foam ist ein gering alkoholisches, gebrauchsfertiges reinigendes Desinfektionsmittel zur Desinfektion von Oberflächen nicht invasiver Medizinprodukte, auch aus empfindlichen Materialien. Zudem geeignet für Displays, Tastaturen, Handys und Tablets und empfindliche Oberflächen – z.B. aus Polycarbonat (PC), Acrylglas (PMMA) und Polysulfon sowie Kunstleder. Ein Einsatz in Großküchen und Lebensmittelbereichen ist möglich.

Wirksamkeit

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS

Wirksamkeit	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
Bakterien / Pilze			
Bakterizid / levurozid	VAH / EN 16615 / EN 13727 / EN 13624	hoch	1 Min.
Tuberkulozid / mykobakterizid	EN 14348	hoch	3 Min.
Viren			
Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)	DVV / RKI / EN 16777	hoch	1 Min.
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	hoch	30 Min.
Norovirus	EN 14476	hoch	2 Min.
Rotavirus	EN 14476	gering	1 Min.
Lebensmittel / Industrie			
Bakterizid / levurozid	EN 1276 / EN 1650 / EN 13697	gering / hoch (20 °C)	1 Min.

* sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen

Bacillol® 30 Sensitive Foam



Anwendung

Bacillol® 30 Sensitive Foam direkt auf die Oberfläche sprühen, mit einem Tuch verteilen. Vollständige Benetzung sicherstellen. Verpackung direkt nach dem Gebrauch wieder verschließen. Die Entfernung von Rückständen ist nicht erforderlich.

Bei Produktwechsel ist eine Zwischenreinigung durchzuführen.

Flächen, die direkt mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sollten nach der Anwendung mit Wasser gereinigt werden.

Hinweise: Stellen Sie sicher, dass kein Desinfektionsmittel in elektronische Geräte eindringt. Anweisungen des Herstellers zur Aufbereitung beachten. Nicht mit anderen Produkten mischen.

Zusammensetzung

Wirkstoffe: Ethanol 140 mg/g; Propan-2-ol 100 mg/g; Propan-1-ol 60 mg/g, Amine, N-C10-16-alkyltrimethylenedi-, Reaktionsprodukte mit Chloressigsäure (CAS-Nr. 139734-65-9) 2 mg/g

Listung

VAH, IHO-Desinfektionsmittelliste.

Chemisch-physikalische Daten

Flammpunkt (DIN EN ISO 3679) 30 °C

Dichte (20 °C) ca. 0,95 g/cm³

pH-Wert (20 °C): ca. 8

Fachberatung

HARTMANN SCIENCE CENTER

Tel: +49 (0) 40 - 54 00 6 -111

E-Mail: science-center@hartmann.info



**Wir forschen für
den Infektionsschutz**
hartmann-science-center.com

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
Bacillol® 30	750 ml Flasche	981 690	16401451	8
Sensitive Foam	5 Liter Kanister	981 861	17401045	1

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Deutschland

Tel. +49 (0) 7321-36-0
Fax +49 (0) 7321-36-36
info@hartmann.info
www.hartmann.info

Hersteller: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg
Ein Unternehmen der HARTMANN GRUPPE