

# MedProtect Cream

28 g

## TR 1. Ürün açıklaması

MedProtect Cream, cildi vücut sıvılarından koruyan, beyaz renkli, yoğun kıvamlı bir kremdir. Cildi nemlendirip uzun süreli bir koruyucu bariyer oluşturarak kuru, kızarmış, tahriş olmuş veya sürtünme nedeniyle yıpranmış cilt alanlarını korur. Bu kremin kullanılması yapışkanlı ürünlerin cilde daha sıkı tutunmasını sağlar.

## 2. Kullanım amacı

MedProtect Cream, risk altındaki cilt bölgelerini inkontinansa bağlı hasar ve tahrişe karşı korur. MedProtect Cream, cildi kronik inkontinans kaynaklı hasarlardan koruyarak sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Aşırı kuru cildi nemlendirir ve koruma sağlar. Bu krem, medikal bantların veya yapışkanlı yara örtülerinin yapışkanlığını azaltmaz.

### 2.1 Hedeflenen popülasyon

MedProtect Cream, yetişkinlerde, çocuklarda ve 12 haftadan büyük bebeklerde kullanılabilir.

### 2.2 Hedeflenen kullanıcı

Sağlık uzmanları tarafından hastane, toplum sağlığı ve evde bakım ortamlarında kullanılabilir.

## 3. Endikasyonlar

MedProtect Cream, inkontinansa bağlı dermatit oluşumunun önlenmesi, inkontinansla ilişkili cilt bozulmalarının önlenmesi, vücut sıvılarıyla ilişkili cilt bozulmalarının önlenmesi ve aşırı kuru cildin nemlendirilmesi amacıyla kullanılır.

## 4. Kontrendikasyonlar / güvenlik bilgileri

MedProtect Cream, enfekte olmuş cilde uygulanmamalıdır. MedProtect Cream, içeriğine karşı bilinen alerjik hassasiyet olması durumunda kullanılmamalıdır.

## 5. Uyarılar

MedProtect Cream bazı yapışkanlı ürünlerin yapışkanlığını artırabilir. Cilt rahatsızlığı ilerlerse veya 7 gün içinde iyileşme göstermezse doktorunuza başvurun. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Yutulması hâlinde tıbbi yardım alın. Yalnızca haricî kullanım içindir. Gözlerle temasından kaçının.

## 6. Kullanım bilgileri

Cilt bölgesini gereken şekilde nazikçe temizleyin. MedProtect Cream içeriğini tüm etkilenen bölgeyi kaplayacak şekilde ince bir tabaka hâlinde yayın. Gerektiği sürece uygulamayı tekrarlayın. Ciltte yağlılık hissinin oluşması, gereğinden fazla miktarda krem kullanıldığını gösterir.

### İçindekiler

Purified Water, Ethylhexyl Isononanoate, Disiloxane, Polyisobutylene, VP Eicosene Copolymer, Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer, Butylene Glycol, Oleth-3 Phosphate, Phenoxyethanol, Hydrogenated Styrene/Isoprene Copolymer, Allantoin, Carbomer, Triethanolamine, Methylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA.

\*Cilt nemlendirici içeriği oluşturan Etileksil ve Butilen Glikol toplam içerik içinde sırasıyla %8-%12 oranlarında bulunurken, bariyer koruyucu içeriği oluşturan Poliizobutilen ve VP Kopolimeri sırasıyla %1-%10 oranlarındadır.

Nihai üründe ek değerlendirme gerektirecek bilinen başka bir içerik (veya bağlantılı etkileşimler) yoktur. Tüm bileşiklerin stabil ve non-reaktif oldukları kabul edilmektedir. Formülasyondaki hiçbir bileşiğin potansiyel olarak tehlikeli bir bileşik oluşmasına yol açacak şekilde karşılıklı reaksiyona girmesi beklenmemektedir (Formülasyonda bilinen hiçbir oksitleyici veya reaktif bileşik (indirgenler, vb.) bulunmamaktadır).

## 7. Klinik faydalar / dikkat edilmesi gereken hususlar

MedProtect Cream, cilt ile vücut atıkları/sıvıları arasında koruyucu kalkan işlevi gören dayanıklı bir bariyer oluşturur. Ürün, vücut sıvılarından kaynaklanan tahrişe karşı bariyer direncini desteklemek amacıyla geliştirilmiştir.

MedProtect Cream, nem kaynaklı cilt hasarlarının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır.

## 8. Saklama

Ürünü normal ortam sıcaklığına ve nem oranına sahip bir yerde, doğrudan güneş ışığından uzak tutarak saklayın. Ürün ilk açıldıktan 28 gün sonra atılmalıdır.

## 9. Bertaraf

**Ürün** - İlgili ülkede geçerli olan çevre koruma yasalarına ve diğer yasal düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Daha fazla bilgi için ülkenizdeki hizmet sağlayıcılarla iletişime geçin.

**Ambalaj** - İlgili ülkede geçerli olan atık yönetimi mevzuatına uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Dış ambalaj geri dönüştürülebilir niteliktedir. Daha fazla bilgi için ülkenizdeki hizmet sağlayıcılarla iletişime geçin.

## 10. Şikâyetler

Ürünle bağlantılı olarak yaşanan tüm ciddi olumsuzlukların hem üreticiye hem de kullanıcının ve/veya hastanın yerleşik olduğu ülkenin yetkili makamına bildirilmesi gerekir.

Şikâyet, soru ve yorumlarınız için +353 43 3349586 numaralı telefondan Avery Dennison Medical Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

TR – Paul Hartmann Tıbbi ve  
Hijyenik Ürünler İth.İhr. Ltd.Şti  
Kozyatağı Mah · Kaya Sultan Sok  
Nanda Plaza, No:83/1/A, Kat:3  
34742 Kadıköy/İstanbul

|                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | Tıbbi Gereç                   |
|    | Üretici                       |
|    | Distribütör                   |
|   | İthalatçı                     |
|   | İsviçre yetkili temsilcisi    |
|  | Son kullanım tarihi           |
|  | Üretim tarihi                 |
|  | Parti kodu                    |
|  | Katalog numarası              |
|  | Kullanma talimatına başvurun  |
|  | Dikkat                        |
|  | Benzersiz cihaz kimliği       |
|  | Paket hasarlı ise kullanmayın |
|  | Kuru yerde tutun              |
|  | Güneş ışığından uzak tutun    |
|  | Tek hastada çoklu kullanım    |
|  | Menşe Ülke                    |

(130326) Made in Ireland LFD-PKG-001541-A

 Avery Dennison Medical Ltd.  
IDA Business Park, Ballinalee Road  
Longford, N39 DX73. Ireland  
phone +353 43 3349586  
fax +353 43 3349566

 PAUL HARTMANN AG  
Paul-Hartmann-Straße 12  
89522 HEIDENHEIM, GERMANY  
www.hartmann.info