

MedProtect

Film Spray

28 ml

TR 1. Ürün açıklaması

MedProtect Film Spray, cilde uygulandığında homojen bir film tabakası oluşturan, polimerik bir solüsyondur. Ürün, cildi yakmayan ve hızlı kuruyan bir çözücü içinde dağıtılmıştır. Cilt üzerinde oluşturduğu renksiz ve saydam film tabakası yüksek oksijen ve nem buharı geçirgenliğine sahiptir. MedProtect Film Spray, sağlam veya hasarlı cildin, idrar ve/veya dışkı inkontinansı, sindirim salgıları ve yara yeri akıntısı kaynaklı tahrişlere karşı korunmasına yardımcı olur. MedProtect Film Spray, tek hastada çoklu kullanıma yönelik olarak geliştirilmiş bir üründür.

2. Kullanım amacı

MedProtect Film Spray, film tabakası oluşturan likit bir ürün olup, sağlam veya hasarlı cilde uygulandığında vücut sıvılarına/atıklarına karşı bir kalkan işlevi gören, uzun dayanımlı ve su geçirmez bir bariyer meydana getirir. Vücut sıvılarının yol açabileceği tahrişe karşı birincil bariyer oluşturmak amacıyla hem yetişkinlerde hem de çocuklarda kullanılabilir.

2.1 Hedeflenen popülasyon

Ürün yetişkinlerde, çocuklarda ve 12 haftadan büyük bebeklerde kullanılabilir.

2.2 Hedeflenen kullanıcı

Sağlık uzmanları tarafından hastane, toplum sağlığı ve evde bakım ortamlarında kullanılabilir.

3. Endikasyonlar

Ürünler aşağıdaki uygulamalar kapsamında sağlam veya hasarlı cilt bölgelerini vücut sıvılarının olumsuz etkilerine karşı korumada endikedir:

- İnkontinans cilt bakımı
- Peri-stomal cilt koruması
- Yara çevresi cilt koruması

4. Kontrendikasyonlar / güvenlik bilgileri

- MedProtect Film Spray, intravenöz kateter uygulama bölgeleri ve tam kat veya kısmi kat yaralar gibi bakteriyel kontaminasyona/penetrasyona karşı yara örtüsüyle korunması gerektiren durumlarda tek başına kullanılmamalıdır.
- MedProtect Film Spray, enfekte olmuş cilde uygulanmamalıdır.

5. Uyarılar



- MedProtect Film Spray, sıvı formda, yanıcı bir üründür; yalnızca iyi havalandırılan alanlarda kullanın.
- Çıplak alev ve tutuşma kaynaklarının yakınında kullanmaktan kaçının.
- Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Paket hasarlı ise kullanmayın.

6. Kullanım bilgileri

- Sprey şişesini açmadan önce gözle hasar kontrolü yapın.
- MedProtect Film Spray uygulanmadan önce cildin temiz ve kuru olması gerekir.
- Sprey başlığını ciltten 100-150 mm (4-6 inç) uzaklıkta tutun; düzgün ve homojen bir katman oluşana kadar elinizi sürekli hareket ettirerek sorunlu alanın tamamına eşit şekilde püskürtün.
- Bir bölgenin atlanması durumunda, ilk MedProtect Film Spray uygulamasının kuruması için (yaklaşık 30 saniye) bekledikten sonra yalnızca atlanan bölgeye yeniden uygulama yapın.
- MedProtect Film Spray cilt kıvrımlarına veya temaslı cilt yüzeylerine uygulanıyorsa, film tabakası tamamen kuruyana kadar temas eden bölgeleri ayırın ve kuruduktan sonra normal konumuna getirin.
- Yapışkanlı bantlar, yara örtüleri veya tıbbi gereçler ile birlikte kullanıldığında:
- Üzerini yara örtüsü veya yapışkanlı ürünler ile kapatmadan önce MedProtect Film Spray uygulamasının tamamen kurumasını bekleyin.
- Yara örtüsü ve/veya yapışkanlı ürünler her değiştirildiğinde MedProtect Film Spray yeniden uygulanmalıdır; yapışkan, MedProtect Film Spray uygulamasının sökülmesine neden olur.
- Vücut sıvıları, dışkı, idrar vb. tahrişine karşı koruma amacıyla ve yapışkanlı bant kullanılmaksızın uygulandığında:
- Temizleme sıklığına bağlı olarak, MedProtect Film Spray uygulamasının 24-72 saatte bir tekrarlanması önerilir.
- Çok sık temizlik gerektiren (sürekli ishal gibi) uç vakalarda uygulamanın daha kısa aralıklarla (her 12-24 saatte bir) tekrarlanması gerekebilir.
- İstenildiğinde, film tabakası piyasada bulunan tıbbi yapışkan çıkarıcı ürünlerden biri kullanılarak, talimatlara uygun şekilde çıkarılabilir. İlgili alan temizlenip kurulandıktan sonra MedProtect Film Spray yeniden uygulanır.
- Her kullanımdan sonra sprej başlığının kapağını yerine takın.

İçindekiler

Disiloxane, Acrylate Copolymer

7. Klinik faydalar / dikkat edilmesi gereken hususlar

MedProtect Film Spray, uygulama sonrası meydana gelebilecek nem temaslarına karşı cildi korur. MedProtect Film Spray, nemi ve olası iritanları uzak tutan ince bir film tabakası oluşturarak cildin korunmasını sağlar.

Dikkat

1. Kızamıklık veya başka tahriş belirtileri ortaya çıkarsa ya da mevcut kızamıklık veya tahriş belirtileri devam ederse, MedProtect Film Spray kullanımını durdurun ve doktorunuza başvurun.
2. Diğer bariyer ürünlerinin, merhemlerin, kremlerin veya losyonların kullanımı MedProtect Film Spray etkinliğini önemli ölçüde azaltabilir.
3. Sprey şişesindeki içerik ilk kullanıma kadar steril kalır.

8. Saklama

MedProtect Film Spray, orijinal kabında, normal ortam sıcaklığına ve nemine sahip kuru bir yerde, doğrudan ısı kaynaklarından ve güneş ışığından uzak tutularak saklanmalıdır. Ürün ilk açıldıktan 28 gün sonra atılmalıdır.

9. Bertaraf

Ürün - İlgili ülkede geçerli olan çevre koruma yasalarına ve diğer yasal düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Daha fazla bilgi için ülkenizdeki hizmet sağlayıcılarla iletişime geçin.

Ambalaj - İlgili ülkede geçerli olan atık yönetimi mevzuatına uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Dış ambalaj geri dönüştürülebilir niteliktedir. Daha fazla bilgi için ülkenizdeki hizmet sağlayıcılarla iletişime geçin.

10. Şikâyetler

Ürünle bağlantılı olarak yaşanan tüm ciddi olumsuzlukların hem üreticiye hem de kullanıcının ve/veya hastanın yerleşik olduğu ülkenin yetkili makamına bildirilmesi gerekir.

Şikâyet, soru ve yorumlarınız için +353 43 3349586 numaralı telefondan Avery Dennison Medical Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

TR – Paul Hartmann Tıbbi ve
Hijyenik Ürünler İth.İhr. Ltd.Şti
Kozyatağı Mah - Kaya Sultan Sok
Nanda Plaza, No:83/1/A, Kat:3
34742 Kadıköy/İstanbul

	Tıbbi Gereç
	Üretici
	Distribütör
	İthalatçı
	İsviçre yetkili temsilcisi
	Son kullanım tarihi
	Üretim tarihi
	Parti kodu
	Katalog numarası
	Kullanma talimatına başvurun
	Dikkat
	Benzersiz cihaz kimliği
	Paket hasarlı ise kullanmayın
	Kuru yerde tutun

	Güneş ışığından uzak tutun
	Yanıcıdır
	Tek hastada çoklu kullanım
	Menşe Ülke

(130326) Made in Ireland LFD-PKG-001535-A

 Avery Dennison Medical Ltd.
IDA Business Park, Ballinalee Road
Longford, N39 DX73. Ireland
phone +353 43 3349586
fax +353 43 3349566

 PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 HEIDENHEIM, GERMANY
www.hartmann.info