

Mikrobac® Tissues / -XXL

Alkoholfreie Reinigungs- und Desinfektionstücher für alkoholempfindliche Oberflächen im wiederverschließbarem Flowpack.



CE 0482

Produkteigenschaften

- Reinigen und desinfizieren in einem Schritt
- Schnell wirksam
- Farbstoff-, parfüm-, alkohol- und aldehydfrei
- Gute Materialverträglichkeit
- Problemlose Wechselanwendung mit Produkten anderer Wirkstoffbasis (z.B. Aldehyde oder Amine) möglich

Anwendungsgebiete

Mikrobac® Tissues sind QAV-basierte gebrauchsfertige Tücher zur reinigenden Desinfektion von Oberflächen nicht invasiver Medizinprodukte. Geeignet für die reinigende Desinfektion unkritischer Ultraschallköpfe.

Für größere Flächen bietet sich der Einsatz der Mikrobac® Tissues XXL an:

- z.B. Patientenliegen, OP-/Röntgentische, Rollstühle/Gehilfen, Oberflächen im Rettungswagen etc.

Wirksamkeit

Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Noro-, Polyoma- und Rotavirus

Wirksamkeit	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
Bakterien / Pilze			
Bakterizidie / Levurozidie	EN 16615/ EN 13727/ EN 13624	hoch	30 Sek.
	VAH*	hoch	1 Min.
Viren			
Begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV)	DVV		30 Sek.
Polyomavirus	DVV		1 Min.
Rotavirus	DVV		30 Sek.
Norovirus	EN 14476	gering / hoch	4 Std.

* mit Mechanik

Mikrobac® Tissues / -XXL



Anwendung

Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt Handschuhe. Wischen Sie alle Oberflächen ab. Vollständige Benetzung sicherstellen. Zum Entfernen von Desinfektionsmittlrückständen nach der Einwirkzeit die Oberflächen, mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) abwischen. Verpackung direkt nach dem Gebrauch wieder verschließen. Bei Produktwechsel ist eine Zwischenreinigung durchzuführen. Nur glatte (nicht saugfähige/nicht poröse) Materialien behandeln.

Desinfizierbare Fläche pro Tuch

- Tuchgröße 18 x 20 cm: 1,5 m²
- Tuchgröße 25 x 38 cm: 2,5 m²

Hinweise: Stellen Sie sicher, dass kein Desinfektionsmittel in elektronische Geräte eindringt. Aufbewahrungsanweisungen des Herstellers beachten. Nicht zur Reinigung der Haut verwenden.

Haltbarkeit

Anbruchstabilität in geöffnetem und wieder fest verschlossenem Flowpack: 3 Monate.

Zusammensetzung

Benzyl-C12-18-alkyldimethylammoniumchloride 4 mg/g; Didecyldimethylammoniumchlorid 4 mg/g

Listung

VAH, IHO-Desinfektionsmittelliste

Chemisch-physikalische Daten

Die Angaben beziehen sich auf die Tränklösung der Mikrobac® Tissues/ Mikrobac® Tissues XXL.

Dichte (20 °C) ca. 1 g /cm³
pH-Wert (20 °C) ca. 8

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
Mikrobac® Tissues	80 Tücher Flowpack Größe 180 x 200 mm	981 387	3282476	6
Mikrobac® Tissues XXL	40 Tücher Flowpack Größe 250 x 380 mm	981 339	4192344	6
Flowpack Wandhalter	1 Wandhalter	981 205	4065893	1
Flowpack-Halter flex	1 Halter	981 899	-	10

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



Hilft. Pflegt. Schützt.

AB 0848306 AT 08.26

PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.
2355 Wiener Neudorf
Österreich

Telefon +43 2236 64630-0
office@at.hartmann.info
www.at.hartmann.info

Hersteller: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg
Ein Unternehmen der HARTMANN GRUPPE