




# Atrauman®

## Salvkompress

Vid såromläggningar finns en risk att sårbädden rivs upp gång på gång. Detta orsakar smärta som kan leda till ovilja hos patienten att byta förband. För att förhindra detta används Atrauman salvkompress som kan kombineras med flera olika typer av förband för att förhindra vidhäftning. Atrauman innehåller triglycerider som skyddar såret mot uttorkning samt skyddar sårets friska kanter. Salvkompressen tillåter, genom sitt finmaskiga nät, vätska att tränga igenom från såret upp i det sekundära förbandet.

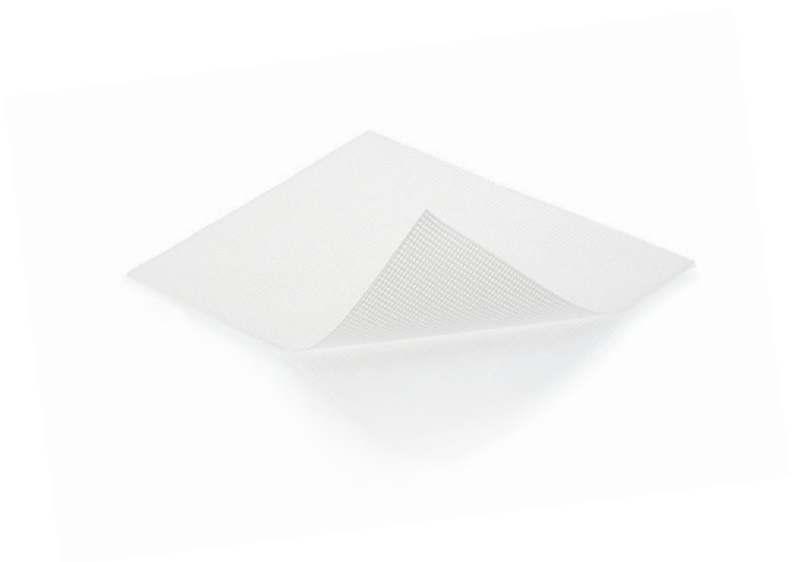

- 1 Många användningsområden
- 2 Förhindrar vidhäftning
- 3 Skyddar sårkanter



Helps. Cares. Protects.

## Fördelar:

Icke vidhäftande  
Skyddar såret  
Hög patientkomfort  
Vårdar sårkanterna



## Egenskaper

Den tunna mjuka väven av hydrofoba polyesterfibrer har en slät ytstruktur som förhindrar att nybildad vävnad växer in i kompressen. På så sätt motverkas tendensen att kompressen fastnar i såret. Inga salvrester lämnas kvar i såret vilket underlättar rengöring och bedömning av sårets tillstånd. Atrauman håller sårytan och dess kanter smidiga och skyddar såret mot uttorkning. Salvmassan är gaspermeabel och genomsläpplig för exudat vilket gör att exsudat snabbt kan transporteras från såret. För att absorbera överflödigt exsudat bör ett absorptionsförband appliceras i kombination med Atrauman. Då salvan saknar verksamma ämnen kan den även användas inom dermatologin, samt för läkemedelskänsliga och patienter med känslig hud. Terapeutiskt verksamma substanser kan tillsättas efter läkarens bedömning. Atrauman bör bytas vid varje såromläggning om läkare ej ordinerar annat.

## Material

Väv av hydrofob polyester, impregnerad med en salvmassa utan verksamma ämnen. Salvan innehåller: fettsyror (triglycerider). Salvan är inte sensibiliserande och innehåller inga tillsatser av vaselin, lanolin eller paraffin.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb, steril. CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
E. [info@hartmann.se](mailto:info@hartmann.se)

[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

## Indikation

Till atraumatisk sårbehandling i sårhäkningsfaserna vid t.ex. skrapsår, bensår, trycksår, mindre brännskador, strålskador, abscesser, hudtransplantationer och vid nagelextraktioner. Kontraindikationer: Inga kända.

## Fixering

Eftersom Atrauman inte fäster mot huden kan det vara svårt att fixera den exempelvis på undersidan av benet. Enklaste sättet är att först lägga salvkompressen på det sekundära förbandet och därefter applicera båda mot såret. Om inget sekundärt förband behövs kan salvkompressen exempelvis fixeras med en gasbinda.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Atrauman®	5 x 5 cm	499510	10 st	40 Afp
Steril, enstycksförpackad	7,5 x 10 cm	499513	10 st	20 Afp
	20 x 30 cm	499515	10 st	3 Afp
	10 x 20 cm	499536	30 st	5 Afp
	5 x 5 cm	499550	50 st	16 Afp
	7,5 x 10 cm	499553	50 st	8 Afp